

Instrukcja wykonania kontroli autoklawu metodą Sporal A oraz transportu materiału do laboratorium mikrobiologicznego

Wykonanie kontroli

1. Przed rozpoczęciem sterylizacji sprawdź termin ważności wskaźnika biologicznego Sporal A.
2. Umieść wskaźnik biologiczny w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej wewnątrz komory autoklawu lub w pakiecie reprezentatywnym dla sterylizowanego wsadu.
3. Przeprowadź pełny cykl sterylizacji zgodnie z instrukcją producenta autoklawu.
4. Po zakończeniu procesu wyjmij wskaźnik ze sterylizatora.
5. Nie otwieraj papierowo-foliowego opakowania wskaźnika i nie wyjmuj paska bibuły ze środka.
6. Umieść wskaźnik w czystej, opisanej papierowej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
7. Do badania dołącz wypełnione zlecenie zawierające:
 - a) nazwę i numer identyfikacyjny sterylizatora,
 - b) datę i godzinę sterylizacji,
 - c) parametry procesu (temperatura, czas, ciśnienie – jeśli dotyczy),
 - d) numer serii i termin ważności wskaźnika,
 - e) miejsce umieszczenia wskaźnika w komorze,
 - f) nazwę i dane zleceniodawcy
8. Wskaźnik powinien trafić do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie - najlepiej tego samego dnia, nie później niż w ciągu 24 godzin.

Transport do laboratorium i wydanie wyników

1. **Laboratorium Mikrobiologiczne SALUS zapewnia odbiór i transport testów do laboratorium.**
2. Po zakończeniu testu sterylizacji, by spełnić wymóg 24 godzin, należy jak najszybciej zamówić transport materiału – w tym celu prosimy o kontakt pod **numer telefonu laboratorium: 59 848 90 40 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.00.**
3. W przypadku dostarczenia materiału we własnym zakresie, prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) Przed dostarczeniem należy telefonicznie potwierdzić z laboratorium dostawę materiału.
 - b) W czasie transportu przechowywać wskaźnik w temperaturze pokojowej.
 - c) Chronić materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
 - d) Wskaźnik należy przekazać do laboratorium w szczelnie zamkniętym, opisanym opakowaniu wraz z kompletnie wypełnionym zleceniem.
 - e) Nie otwierać wskaźnika biologicznego przed dostarczeniem do laboratorium.
 - f) Nie dostarczać wskaźników pochodzących z cyklu sterylizacji, w którym wystąpiła awaria lub nie zostały osiągnięte wymagane parametry procesu.
4. Standardowy czas wykonania badania przez laboratorium (gdy wynik ujemny) wynosi 2 dni.
5. Wyniki badania zostaną przekazane drogą mailową na uzgodniony w umowie adres poczty elektronicznej.